

MASTELLI Officina Bio-Farmaceutica Sanremo	Codice: MC615X Revisione: 02 Del: 09/2020 PAG. 01/01
Descrizione: FOGLI ILL DEFINISSE NEUTRALIZING BUFFER	
Materiale: CARTA	
Dimensioni: 210 X 297 mm	Dimensioni piegato: 37,5 X 210 mm
Piega: SUL LATO LUNGO	Grammatura: 50 g/m ²
n° colori: 1	Pantoni: 296 C X X X X
Altri Effetti:	X X



Definisso™ neutralizing buffer

EN 150 ml bottle, pH 5 - 5,5

Definisso neutralizing buffer è una neutralizzante da utilizzare dopo il peeling chimico.
Definisso neutralizing buffer neutralizza efficacemente ma delicatamente gli acidi che residuano sulla pelle dopo il peeling, mantenendo il pH della cute a valori fisiologici (pH 5 - 5,5). Con Definisso neutralizing buffer la pelle non viene portata a valori di pH basico (come invece può accadere utilizzando neutralizzanti basici, es bicarbonato di sodio), evitando di dare alla pelle appena trattata ulteriori stress chimici.

Contiene anche chitosano che svolge una funzione lenitiva ed idratante.

Indicazioni

Definisso neutralizing buffer è indicato per:
• interrompere l'azione del peeling residuo sulla cute, tamponando i residui acidi, ma senza portare la cute a pH basico

• uniformare il pH della cute a valori fisiologici (pH 5 - 5,5)

• idratare la cute e lenire la cute

Modalità d'uso

1. Versare in una ciotola circa 5ml di Definisso neutralizing buffer.

2. Mediante pennello a ventaglio distribuire uniformemente il tamponio su tutte le aree precedentemente trattate, facilmente evidenzieribili dalla patta bianchierina che il peeling ha lasciato sulla pelle.

3. Lasciare agire qualche minuto, poi asportare i residui mediante cialde in cotone o gaze.

4. E' quindi possibile applicare una crema lenitiva.

Fase post peeling

Poiché l'esfoliazione determina un assottigliamento degli strati superficiali dell'epidermide, è importante gestire adeguatamente anche i giorni successivi al peeling (fase post-peeling) per non incorrere in eventuali effetti collaterali. Pertanto si consiglia l'utilizzo di:

• protezione solare adeguata durante il giorno
• prodotti idratanti e ripetitolanti
• detergenti delicati

• prodotti in grado di modulare la melanogenesi
Informare il paziente di non esporsi al sole senza adeguata protezione solare e di non asportare o trarre eventuali "pellizie" o croste staccandole manualmente.

Il paziente dovrà sospendere l'applicazione di eventuali prodotti esfolianti e trattanti, fino al completo ripristino della barriera cutanea ed evitare la utilizzo di prodotti di propria iniziativa senza prima aver consultato il medico.

Precauzioni generali

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.

Non utilizzare il prodotto se la confezione appare danneggiata.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire: in caso di ingerizione consultare il medico.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

For exclusive use by medical staff or qualified healthcare professionals.

INGREDIENTS: chitosano, pyrrolidone carboxylate, lattico acido, sodium lactate, purified water.

DATE OF LAST REVISION
09/2020

MANUFACTURER
Mastelli srl, Via Bussana Vecchia 32, 18038
Sanremo (IM) - Italia
www.mastelli.it

MEDICAL DEVICE CE

DISPOSITIVO MEDICO CE

IT Flacone da 150 ml, pH 5 - 5,5

Definisso neutralizing buffer è una neutralizzante da utilizzare dopo il peeling chimico.

Definisso neutralizing buffer neutralizza efficacemente ma delicatamente gli acidi che residuano sulla pelle dopo il peeling, mantenendo il pH della cute a valori fisiologici (pH 5 - 5,5). Con Definisso neutralizing buffer la pelle non viene portata a valori di pH basico (come invece può accadere utilizzando neutralizzanti basici, es bicarbonato di sodio), evitando di dare alla pelle appena trattata ulteriori stress chimici.

Contiene anche chitosano che svolge una funzione lenitiva ed idratante.

Indicazioni

Definisso neutralizing buffer è indicato per:
• interrompere l'azione del peeling residuo sulla cute, tamponando i residui acidi, ma senza portare la cute a pH basico

• uniformare il pH della cute a valori fisiologici (pH 5 - 5,5)

• idratare la cute e lenire la cute

Modalità d'uso

1. Versare in una ciotola circa 5ml di Definisso neutralizing buffer.

2. Mediante pennello a ventaglio distribuire uniformemente il tamponio su tutte le aree precedentemente trattate, facilmente evidenzieribili dalla patta bianchierina che il peeling ha lasciato sulla pelle.

3. Lasciare agire qualche minuto, poi asportare i residui mediante cialde in cotone o gaze.

4. E' quindi possibile applicare una crema lenitiva.

Fase post peeling

Poiché l'esfoliazione determina un assottigliamento degli strati superficiali dell'epidermide, è importante gestire adeguatamente anche i giorni successivi al peeling (fase post-peeling) per non incorrere in eventuali effetti collaterali. Pertanto si consiglia l'utilizzo di:

• protezione solare adeguata durante il giorno
• prodotti idratanti e ripetitolanti
• detergenti delicati

• prodotti in grado di modulare la melanogenesi
Informare il paziente di non esporsi al sole senza adeguata protezione solare e di non asportare o trarre eventuali "pellizie" o croste staccandole manualmente.

Il paziente dovrà sospendere l'applicazione di eventuali prodotti esfolianti e trattanti, fino al completo ripristino della barriera cutanea ed evitare la utilizzo di prodotti di propria iniziativa senza prima aver consultato il medico.

Precauzioni generali

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.

Non utilizzare il prodotto se la confezione appare danneggiata.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire: in caso di ingerizione consultare il medico.

Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e dal calore. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

For exclusive use by medical staff or qualified healthcare professionals.

INGREDIENTS: chitosano, pyrrolidone carboxylate, lattico acido, sodium lactate, purified water.

DATE OF LAST REVISION
09/2020

MANUFACTURER
Mastelli srl, Via Bussana Vecchia 32, 18038
Sanremo (IM) - Italia
www.mastelli.it

MEDICAL DEVICE CE

DE Flacone da 150 ml, pH 5 - 5,5

Definisso Neutralizing Buffer è una neutralizzante

peeling

efficacemente ma delicatamente gli acidi

residuano

sulla pelle

dopo il

mantenendo

il pH

de la

cute

después

el

peeling

verde

de la

piel

después

el

peeling

chimico

efectivamente

pero

delicadamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico

efectivamente

que quedan

sobre

la

pelle

después

el

peeling

chimico